

	Unità Operativa di MEDICINA DI LABORATORIO Direttore dott. ssa Piera Reghenzi	
	GUIDA PER GLI UTENTI: ISTRUZIONI	

QUANTIFERON (QTF) TB Gold Plus

Istruzioni per gli operatori

Giorni d'esecuzione del prelievo: il prelievo può essere eseguito dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni prefestivi.

Tipo di provette: kit costituito da quattro provette dedicate (Quantiferon tappo grigio, tappo rosso, tappo viola, tappo verde), un adattatore e un set di raccolta sangue con ago butterfly.

Conservazione delle provette: i kit di provette possono essere conservati ad una temperatura compresa tra 4 °C e 25 °C fino a data di scadenza. Le provette devono essere ad una temperatura di 17 – 25°C al momento del prelievo. **Richiesta del kit di prelievo:** dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00 presso il Laboratorio Analisi.

Modalità di prelievo:

- Inserire l'ago butterfly in vena.
- Applicare il raccordo e verificare che il tubo si sia riempito di sangue prima di usare le provette QTF **e/o raccogliere per prima una provetta da siero**
- Raccordare le provette QTF e far defluire il sangue (il flusso di sangue si arresta non appena raggiunto il livello indicato dalla tacca nera presente sul lato delle provette). **Importante raccogliere il livello segnato**
- Miscelare il contenuto delle provette capovolgendole per 8-10 volte, o scuotendole per 5 secondi, verificando che l'intera superficie interna della provetta sia ricoperta di sangue. E' fondamentale agitare le provette per garantire che il campione di sangue si mescoli completamente al contenuto della provetta.
- Apporre le etichette con barcode senza coprire la tacca nera.
- Nel caso di richiesta di ulteriori esami per lo stesso paziente raccordare di seguito le provette SARSTEDT, in uso presso la struttura.